

NOWOŚĆ

StarLink Edge LE Adapter



AUDIBEL

Połącz się & Korzystaj

Adapter StarLink Edge LE umożliwia łatwe podłączenie kompatybilnych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w złącze USB-C do aparatów słuchowych Starkey z technologią LE Audio, zapewniając wysokiej jakości strumieniowanie i dźwięk bez konieczności używania rąk.

Kompatybilny z:

ARIS^{AI} VITALITY^{AI}

Warto wiedzieć:

Telefony i tablety wyposażone w gniazdo audio 3,5 mm mogą nie współpracować z adapterem ze względu na sposób przesyłania sygnału audio w urządzeniu.




Sparuj swój *StarLink Edge LE Adapter*

1. Podłącz adapter do urządzenia źródłowego



Po podłączeniu do urządzenia źródłowego (telefonu, tabletu lub komputera PC). Adapter automatycznie się włączy i przy pierwszym użyciu przejdzie w tryb parowania, jeśli nie wykryje wcześniej zapisanych połączeń.

2. Sparuj swoje aparaty słuchowe z technologią LE Audio

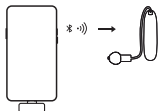

W trybie parowania wskaźnik LED na adapterze będzie migać na niebiesko. Wyłącz, a następnie ponownie włącz aparaty słuchowe, aby aktywować tryb parowania. Po pomyślnym sparowaniu dioda LED na adapterze zaświeci się ciągłym niebieskim światłem przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.


Ponowne połączenie:

Jeśli połączenie zostanie utracone, odłącz i ponownie podłącz adapter.

Uwaga: Niektóre funkcje sterowania dostępne w aparacie (lub aparatach) słuchowym mogą nie działać podczas korzystania z adaptera. Do odbierania i kończenia połączeń telefonicznych używaj urządzenia źródłowego (telefonu, tabletu lub komputera).

POZOSTAŁE FUNKCJE

Ładowanie telefonu lub tabletu podczas korzystania z adaptera

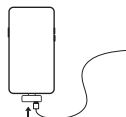

Podłącz przewód ładowania do adaptera, aby ładować telefon lub tablet. Pamiętaj, że podczas korzystania z adaptera nie jest możliwe przesyłanie danych przez złącze USB.

Resetowanie urządzenia i przejście do trybu parowania



Za pomocą cienkiego, ostro zakończonego narzędzia naciśnij przycisk resetowania, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko. Oznacza to, że adapter znajduje się w trybie parowania i jest gotowy do sparowania z nowym urządzeniem.

Znaczenie wskaźnika LED

Wskaźnik LED

Łączenie: Migające niebieskie światło.

Połączony: Niebieskie światło diody LED świeci się nieprzerwanie przez 5 sekund, a następnie gaśnie.

