

LE Adapter StarLink Edge

Adapter StarLink Edge LE umożliwia łatwe podłączenie kompatybilnych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w złącze USB-C do aparatów słuchowych Starkey z technologią LE Audio, zapewniając bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe i dźwięk w wysokiej jakości.

Adapter LE jest przeznaczony do telefonów, tabletów i komputerów z systemem Android, *a nie do urządzeń Apple.*



Parowanie

1. Podłącz adapter do portu USB-C w urządzeniu głównym (telefon, tablet, komputer), a adapter automatycznie się włączy.
2. Wskaźnik LED adaptera będzie migać na niebiesko w trybie parowania tylko wtedy, gdy adapter nie został wcześniej sparowany z urządzeniem. Jeśli adapter został sparowany z urządzeniem, wskaźnik LED nie będzie migać ani świecić.
3. Aby sparować aparaty słuchowe z adapterem LE, należy je wyłączyć i ponownie włączyć:
 - W przypadku aparatów słuchowych z akumulatorem należy umieścić je w ładowarce na kilka sekund, a następnie wyjąć z ładowarki.
 - W przypadku aparatów słuchowych bez akumulatorów należy otworzyć i zamknąć komorę baterii.
4. Podczas parowania z adapterem aparaty słuchowe będą migać na zielono. W przypadku zestawu aparatów słuchowych każdy aparat będzie migać niezależnie, a po zakończeniu parowania miganie ustanie.
5. Dioda LED na adapterze LE świeci niebieskim światłem ciągłym przez 5 sekund, a następnie gaśnie po zakończeniu parowania.
6. Gdy dioda LED aparatu słuchowego przestanie migać, oznacza to, że został sparowany z adapterem LE.
7. Adapter LE pozostanie sparowany z aparatami słuchowymi nawet po podłączeniu do innego telefonu, tabletu lub komputera. Adapter należy sparować ponownie tylko w przypadku korzystania z innego zestawu aparatów słuchowych.

Jeśli urządzenie nie posiada portu USB-C, można użyć przejściówki USB, np. z USB-C na USB-A, jednak nie ma gwarancji, że każda przejściówka innej firmy będzie działać.

Korzystanie

1. Gdy adapter LE i aparaty słuchowe zostaną sparowane z Twoim urządzeniem, możesz już przysyłać strumieniowo dźwięk lub prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem adaptera.
2. Możesz używać urządzenia głównego do odbierania i kończenia połączeń.
3. W przypadku utraty połączenia należy ponownie podłączyć adapter do urządzenia głównego.

Nie zaleca się używania adaptera LE z urządzeniami wyposażonymi w gniazdo audio 3,5 mm, ponieważ dźwięk zazwyczaj jest przesyłany przez to gniazdo, a nie przez USB-C.

Resetowanie

1. Aby zresetować adapter StarLink Edge LE, należy podłączyć go do włączonego telefonu, tabletu lub komputera.
2. Za pomocą ostro zakończonego narzędzia, takiego jak spinacz biurowy lub szpilka, naciśnij przycisk resetowania, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.
3. Gdy dioda LED zacznie migać na niebiesko, adapter jest gotowy do sparowania z nowym urządzeniem.

Ładowanie

1. Adapter LE nie wymaga ładowania, ale musi być podłączony do urządzenia głównego (telefonu, tabletu, komputera), aby umożliwić strumieniowe przesyłanie dźwięku.
2. Telefon lub tablet można ładować, gdy adapter StarLink Edge LE jest podłączony do urządzenia. Podłącz kabel ładujący do portu USB-C na adapterze.
3. Czas ładowania urządzenia głównego może się różnić.
4. Szybkie ładowanie lub transfer danych nie są obsługiwane, gdy kabel ładujący jest podłączony przez adapter.

Funkcje mogą się różnić w zależności od kraju.

Ta aplikacja może się nieznacznie różnić w zależności od posiadanego telefonu.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma Starkey korzysta z nich na podstawie licencji. Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach i regionach.

Strumieniowe przesyłanie dźwięku jest obsługiwane przez niektóre urządzenia z systemem Android. Strumieniowe przesyłanie dźwięku w systemie Android jest również obsługiwane przy użyciu mikrofonu zdalnego Remote Microphone +.

Logo Starkey oraz nazwa Starkey Edge są znakami towarowymi firmy Starkey Laboratories, Inc. ©2026 Starkey Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 726 FLYR4656-00-PL-AB



AUDIBEL