

TV Streamer StarLink Edge

Opis urządzenia: Streamer TV StarLink Edge to nowoczesne urządzenie do bezprzewodowego przesyłania dźwięku z telewizorów, komputerów, odtwarzaczy MP3, DVD bezpośrednio do aparatów słuchowych. Umożliwia jednocześnie udostępnianie dźwięku nieograniczonej liczbie użytkowników, zapewniając wspólne wrażenia słuchowe. Obsługuje technologię Bluetooth Low Energy Audio i jest kompatybilny wyłącznie z rozwiązaniami Edge AI i Vitality AI. Dźwięk w aparatach słuchowych jest aktywowany automatycznie, gdy pacjent znajdzie się w zasięgu aktywnego Streamera TV StarLink Edge, co zapewnia wygodę i bezproblemowe użytkowanie.



Zasięg: Do 15 metrów

Dedykowany: Aparatom słuchowym Edge AI i Vitality AI oraz dla przyszłych rozwiązań posiadających Bluetooth Low Energy Audio.

Kompatybilny: telewizorów, komputerów, odtwarzaczy MP3, DVD


Parowanie: Przed pierwszym użyciem streamera TV należy sparować go z aparatami słuchowymi. Dzięki temu urządzenie będzie mogło rozpoznać aparaty słuchowe i współpracować z nimi.

Parowanie bezpośrednie z aparatami:

1. Podłącz streamer TV do zasilania (gniazdka ściennego) i włącz go.
2. Wyłącz i włącz aparaty słuchowe. W przypadku systemów CROS: Wyłącz aparat słuchowy i nadajnik CROS. Następnie włącz aparat słuchowy, ale nie włączaj nadajnika CROS.
3. Sparuj streamer TV z aparatami słuchowymi:
 - I. Upewnij się, że aparaty słuchowe nie są połączone z pobliskimi urządzeniami Bluetooth:
 - Wyłącz Bluetooth w telefonie komórkowym.
 - Wyłącz wszystkie akcesoria bezprzewodowe podłączone do aparatów słuchowych.
 - II. Umieść aparaty słuchowe w odległości 15 cm (6 cali) od streamera TV. Im bliżej, tym lepiej. Obok, ale nie na obudowie streamera TV.
 - III. Naciśnij przycisk parowania na streamerze TV. Wskaźnik zacznie migać na zielono.
 - IV. Po pomyślnym sparowaniu **zielony** wskaźnik będzie świecił przez 2 sekundy dla każdego aparatu słuchowego.

Parowanie w programie ProFit



1. W trakcie sesji otwieramy zakładkę Akcesoria:

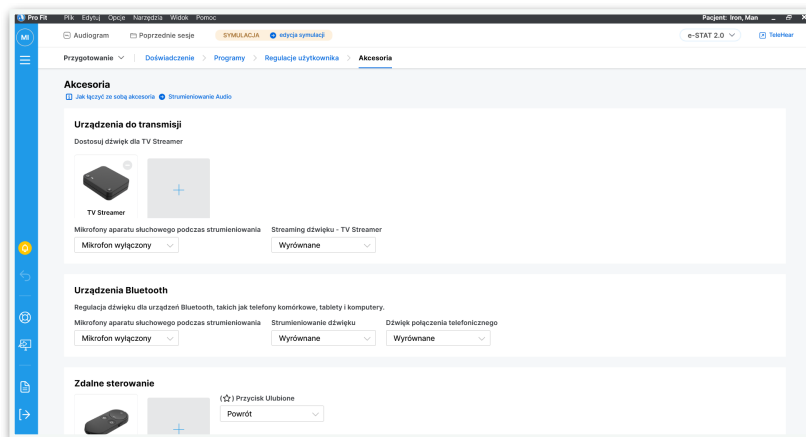


2. Z ekranu Akcesoria wybierz zakładkę " Jak łączyć ze sobą akcesoria" w celu zapoznania się z instrukcjami:



3. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Podłącz streamer TV do zasilania (gniazdka ściennego) i włącz go. Aktywuj funkcję parowania poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem bluetooth. Na ekranie akcesoria w sekcji TV Streamer naciśnij plus.

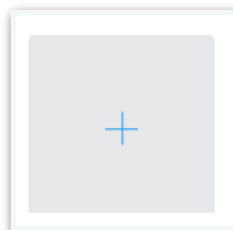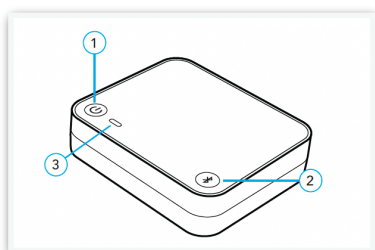



4. Po sparowania dioda na streamerze zaświeci się na zielono a na ekranie akcesoriów pojawi się zdjęcie TV streamera. Ważne aby nie trzymać aparatów słuchowych zbyt daleko od TV streamera w trakcie parowania.

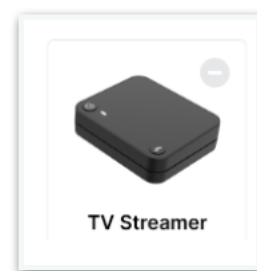

Aktywacja:

Protetyk słucho:

Aktywacja w programie ProFit funkcji "Star/Stop transmisji" w zakładce Regulacja użytkownika.

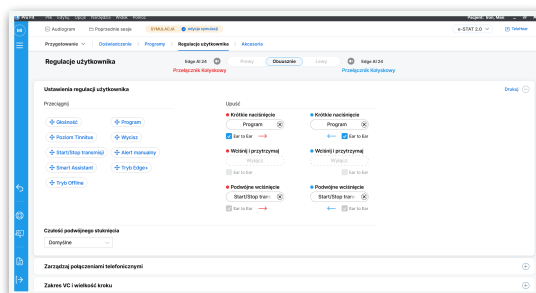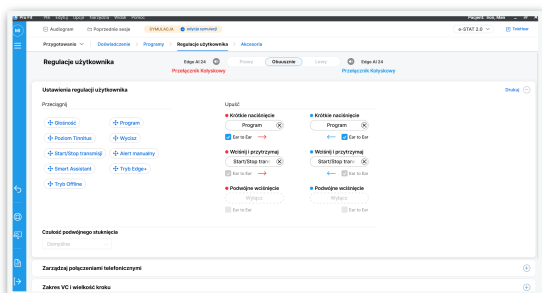

Pacjent:

Po włączeniu streamera i telewizora, pacjent aktywuje przesyłanie dźwięku do aparatów słuchowych poprzez:

- Przycisk aparatu słuchowego: Wciśnij i przytrzymaj
- Podwójne stuknięcie w aparat słuchowy
- Przycisk "Ulubione" w pilocie StarLink 2.0 (po wcześniejszym zaprogramowaniu)
- Aplikacja My Starkey/My Audibel zakładka: Akcesoria/Opcje transmisji strumieniowej



Uwaga: Po rozpoczęciu transmisji, dźwięk strumieniowany będzie odtwarzany automatycznie w aparatach słuchowych za każdym razem, gdy pacjent znajdzie się w zasięgu działania streamera. Oznacza to, że aby streaming działał automatycznie, najpierw musimy ręcznie aktywować

transmisję (za pomocą przycisku, tapnięcia lub aplikacji). Następnie, gdy użytkownik wyjdzie poza zasięg, streaming się zatrzyma, ale po powrocie w zasięg dźwięk wznowi się automatycznie, bez konieczności ponownej aktywacji. Dla porównania, w przypadku Streamera TV StarLink, za każdym razem, gdy użytkownik opuszcza zasięg (np. pacjent idzie do łazienki), po powrocie musi ponownie aktywować transmisję. W aparatach słuchowych połączonych z TV Streamerem StarLink Edge ten problem nie występuje – po powrocie w zasięg dźwięk wznowia się samoczynnie.

Mikrofon StarLink Edge

Opis urządzenia: Zdalny mikrofon StarLink Edge firmy Starkey to nowoczesne akcesorium z trzema mikrofonami kierunkowymi. Automatycznie przełącza się w tryb kierunkowy lub wielokierunkowy, w zależności od orientacji. Podczas połączeń telefonicznych lub strumieniowania multimedialnych mikrofon wstrzymuje strumień, który wznowia po zakończeniu. Nowością jest funkcja pilota do aparatów słuchowych, pozwalająca na zmianę głośności (krótkie naciśnięcie) lub programu (długie naciśnięcie). Mikrofon działa przez 10 godzin na baterii, ładuje się w 3 godziny, a po 30 minutach bez połączenia przechodzi w tryb uśpienia.



Zasięg: Do 10 metrów

Dedykowany: Aparatom słuchowym Edge AI i Vitality AI oraz dla przyszłych rozwiązań posiadających Bluetooth Low Energy Audio.

Parowanie: Przed pierwszym użyciem mikrofonu należy sparować go z aparatami słuchowymi. Dzięki temu urządzenie będzie mogło rozpoznać aparaty słuchowe i współpracować z nimi.


Parowanie bezpośrednio z aparatami:

1. Wyłącz telefon komórkowy lub inne akcesoria, które były wcześniej sparowane z aparatami słuchowymi.
2. Upewnij się, że mikrofon zdalny jest włączony.
3. Wyłącz, a następnie włącz aparaty słuchowe, aby przełączyć je w tryb parowania.
4. Umieść aparaty słuchowe w odległości sześciu centymetrów od mikrofonu.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 2 sekundy. Dioda LED zacznie migać na zielono.
6. W ciągu minuty dioda LED zaświeci się na **zielono** na 2 sekundy po zakończeniu parowania w każdym aparacie słuchowym.



Parowanie w programie ProFit

1. Uruchom Pro Fit i podłącz aparaty słuchowe.
2. Wybierz zakładkę Akcesoria.
3. Wybierz Jak sparować akcesoria, aby w razie potrzeby uzyskać instrukcje parowania.

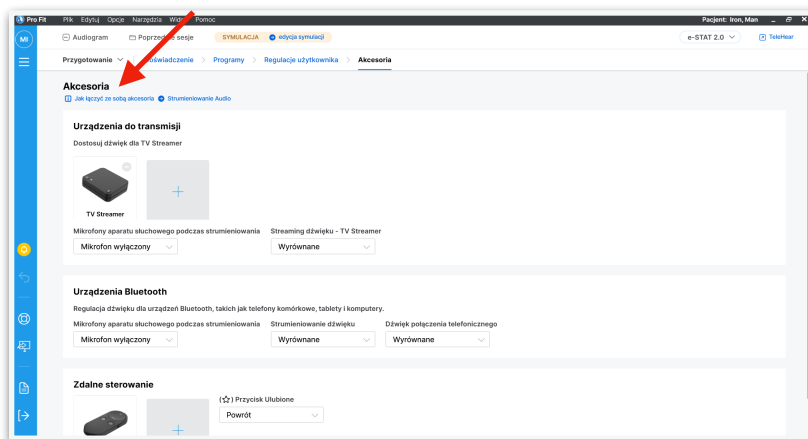

4. Upewnij się, że mikrofon zdalny jest włączony.
5. Umieść aparaty słuchowe w odległości sześciu centymetrów od mikrofonu.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 2 sekundy. Dioda LED zacznie migać na zielono.
7. Wybierz symbol plusa "+" z sekcji Urządzenia do transmisji, aby przełączyć aparaty słuchowe w tryb parowania.
8. Parowanie zakończy się pomyślnie, gdy na ekranie akcesoriów wyświetlony zostanie obraz mikrofonu Edge a dioda LED zaświeci się na **zielono**.



Włączanie zasilania
Przesuń przełącznik w kierunku diody LED. Dioda LED będzie świecić na biało przez 2 sekundy.





Wyłączenie zasilania
Przesuń przełącznik w kierunku diody LED. Dioda LED zaświeci się na czerwono na 2 sekundy.

Aktywacja:

Protetyk słuchu:

Aktywacja w programie Pro Fit funkcji "Start/Stop transmisji" w zakładce Regulacja użytkownika.

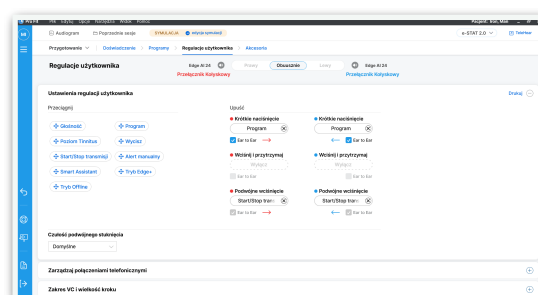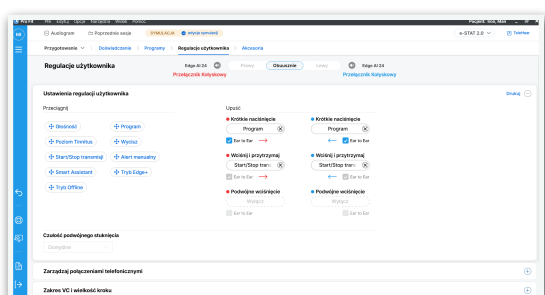

Pacjent:

Po uruchomieniu mikrofonu, pacjent aktywuje przesyłanie dźwięku do aparatów słuchowych poprzez:

- Przycisk aparatu słuchowego: Wciśnij i przytrzymaj
- Podwójne stuknięcie w aparat słuchowy
- Aplikacja My Starkey/My Audibel zakładka: Akcesoria/Opcje transmisji strumieniowej



Pilot StarLink 2.0

Opis urządzenia: Pilot zdalnego sterowania StarLink 2.0 został przeprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie, umożliwiając użytkownikom łatwe sterowanie głośnością, zmianę programów i szybki dostęp do ulubionych funkcji. Teraz z wymienną baterią i poręczną smyczą.



Zasięg: Do 10 metrów

Dedykowany: Aparatom słuchowym Edge AI, Vitality AI oraz przyszłe rozwiązania z Bluetooth Low Energy Audio. Kompatybilny z produktami z poprzednich linii, które mają łączność Bluetooth (Genesis AI, Intrigue AI, Evolv AI, Arc AI, Livio AI, Via AI), a także z rozwiązaniami Model S i Model A.

Parowanie: Przed pierwszym użyciem pilota należy sparować go z aparatami słuchowymi. Dzięki temu urządzenie będzie mogło rozpoznać aparaty słuchowe i współpracować z nimi.

Parowanie bezpośrednio z aparatami:

1. Wyłącz telefon komórkowy lub inne akcesoria, które był wcześniej sparowane z aparatami słuchowymi.
2. Upewnij się, że przełącznik blokady znajduje się w położeniu odblokowania (w górę).
3. Wyłącz, a następnie włącz aparaty słuchowe, aby przełączyć je w tryb




parowania.


4. Umieść aparaty słuchowe w odległości do 15 centymetrów od pilota.
 5. Naciśnij przycisk Ulubione na 5 sekund. Dioda LED zacznie szybko migać.
 6. Gdy dioda LED zaświeci się na 2 sekundy, oznacza to że, oba urządzenia są sparowane.
- Pilot zdalnego sterowania rozpozna, czy dopasowanie jest jedno czy obustronne i odpowiednio sparuje jedno lub dwa urządzenia.

Parowanie w Pro Fit

1. Uruchom Pro Fit i podłącz aparaty słuchowe.
2. Wybierz zakładkę Akcesoria.
3. Wybierz Jak sparować akcesoria, aby w razie potrzeby uzyskać instrukcje parowania.

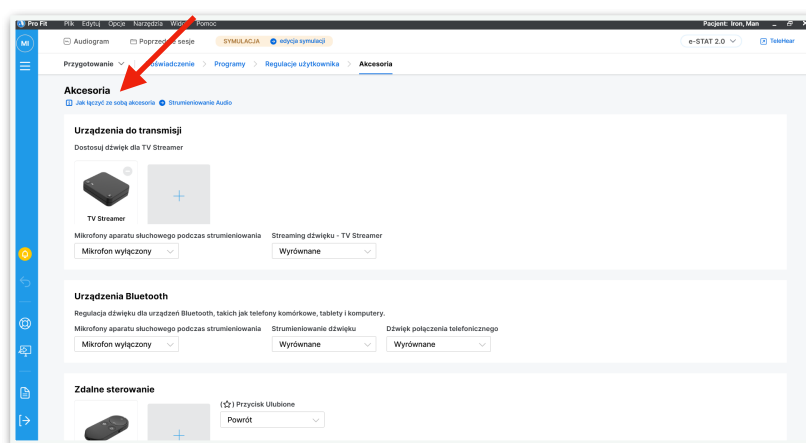

4. Upewnij się, że przełącznik blokady w pilocie znajduje się w położeniu odblokowania (w górę).
5. Umieść aparaty słuchowe w odległości do 15 centymetrów od pilota.
6. Przełącz pilota w tryb parowania, naciskając przycisk Ulubione przez 5 sekund.
7. Dioda LED zacznie szybko migać.
8. Wybierz opcję parowania „+” w Pro Fit, aby przełączyć aparaty słuchowe w tryb parowania.

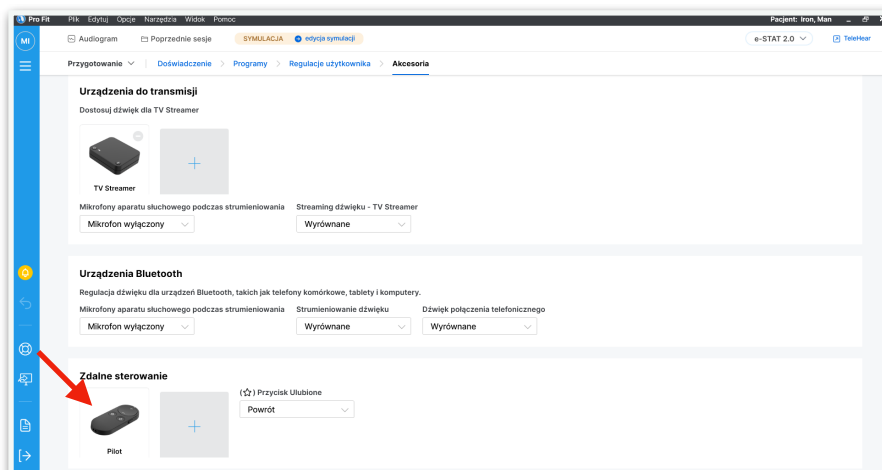

9. Parowanie zakończy się pomyślnie, gdy na ekranie akcesoriów zostanie wyświetlony obraz pilota.
10. Użyj menu rozwijanego pod obrazem pilota, aby ustawić konfigurację przycisku Ulubione.

Mikrofon stołowy StarLink Edge

Opis urządzenia: Mikrofon stołowy StarLink Edge oferuje automatyczne wznowienie transmisji dźwięku, gdy jest ono przerwane. Dzięki technologii Bluetooth LE Audio zapewnia wysoką jakość dźwięku, co pomaga pacjentom lepiej rozumieć mowę. Mikrofon jest idealny w różnych sytuacjach: podczas rozmów jeden na jeden, w grupie czy przy słuchaniu na odległość, ułatwiając odbiór dźwięku w różnych warunkach. Mikrofon ma osiem mikrofonów, które precyzyjnie wychwytują mowę wokół użytkownika. Może działać w czterech trybach:



- **Tryb automatyczny:** Śledzi głównego mówcę w grupie, idealny do dynamicznych rozmów.
- **Tryb manualny:** Pozwala słuchać tylko wybranych osób w grupie – użytkownik przytrzymuje mikrofon przy osobie, którą chce usłyszeć.
- **Tryb surround:** Używa wszystkich mikrofonów jednocześnie, co sprawdza się w cichych grupach.
- **Tryb pojedynczego mówcy:** Mikrofon może być używany z osobą, która nosi go na szyi, ułatwiając słuchanie w sytuacjach jeden na jeden.

Mikrofon ma akcelerometr, który wykrywa, kiedy jest w pozycji pionowej, i wtedy używa tylko górnego mikrofonu.


Zasięg: Do 10 metrów

Dedykowany: Aparatom słuchowym Edge AI i Vitality AI oraz dla przyszłych rozwiązań posiadających Bluetooth Low Energy Audio.

Parowanie: Przed pierwszym użyciem mikrofonu należy sparować go z aparatami słuchowymi. Dzięki temu urządzenie będzie mogło rozpoznać aparaty słuchowe i współpracować z nimi.


Parowanie bezpośrednio z aparatami:


1. Upewnij się, że aparaty słuchowe nie są połączone z żadnymi innymi urządzeniami Bluetooth: Wyłącz Bluetooth w telefonie komórkowym.
2. Wyłącz inne sparowane akcesoria bezprzewodowe.
3. Umieść aparaty słuchowe w odległości do 15 cm od Mikrofonu stołowego.
4. Włącz mikrofon stołowy- naciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy, a następnie zwolnij. Zielone segmenty na mikrofonie zapalą się jeden po drugim, wskazując poziom naładowania baterii.

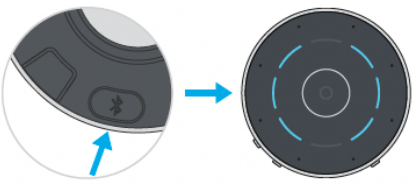5. Wyłącz i następnie włącz aparaty słuchowe.
 - Jeśli aparat jest ładowalny, umieść go w ładowarce na 3 sekundy, a następnie wyjmij.
 - Jeśli aparat ma baterię, otwórz i zamknij drzwiczki baterii.
 - Dla systemów CROS: Wyłącz aparat słuchowy i nadajnik CROS. Następnie włącz aparat, pozostawiając nadajnik CROS wyłączony.
6. Naciśnij przycisk z symbolem bluetooth na odwrocie Mikrofonu stołowego i następnie połóż go na stabilnej powierzchni, tak aby przycisk zasilania i przyciski głośności były skierowane w Twoją stronę. Migające niebieskie segmenty oznaczają, że Mikrofon Stołowy jest gotowy do parowania.
 
7. Gdy **wszystkie** segmenty zapalą się na **zielono**, oznacza to, że aparaty słuchowe połączyły się z Mikrofonem Stołowym.

Parowanie w programie ProFit

1. Uruchom Pro Fit i podłącz aparaty słuchowe.
2. Wybierz zakładkę Akcesoria.
3. Wybierz Jak sparować akcesoria, aby w razie potrzeby uzyskać instrukcje parowania.

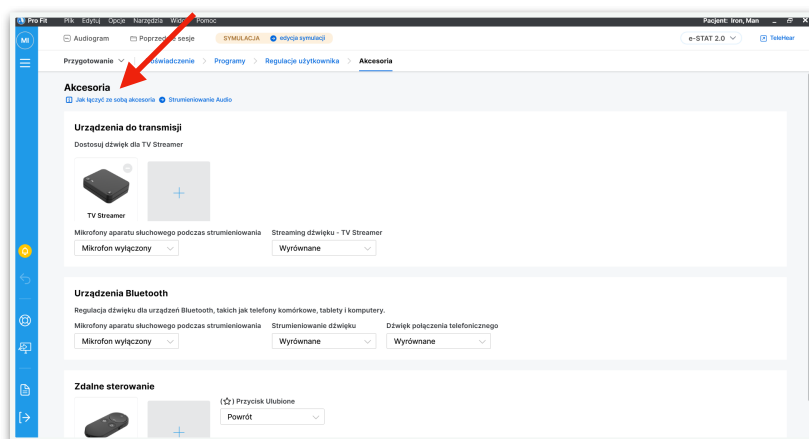


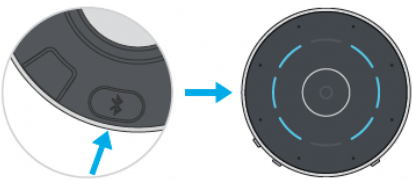
4. Upewnij się, że Mikrofon Stołowy jest wyłączony.
5. Umieść aparaty słuchowe w odległości kilku centymetrów od mikrofonu.
6. Naciśnij przycisk z symbolem bluetooth na odwrocie Mikrofonu stołowego i następnie połóż go na stabilnej powierzchni, tak aby przycisk zasilania i przyciski głośności były skierowane w Twoją stronę. Migające niebieskie segmenty oznaczają, że Mikrofon Stołowy jest gotowy do parowania.
 

7. Wybierz symbol plusa "+" z sekcji Urządzenia do transmisji, aby przełączyć aparaty słuchowe w tryb parowania.
8. Gdy **wszystkie** segmenty zapalą się na **zielono**, oznacza to, że aparaty słuchowe połączyły się z Mikrofonem Stołowym.

Aktywacja:

Protetyk słucho:

Aktywacja w programie Pro Fit funkcji "Start/Stop transmisji" w zakładce Regulacja użytkownika.

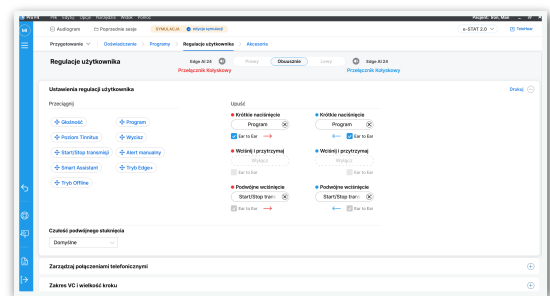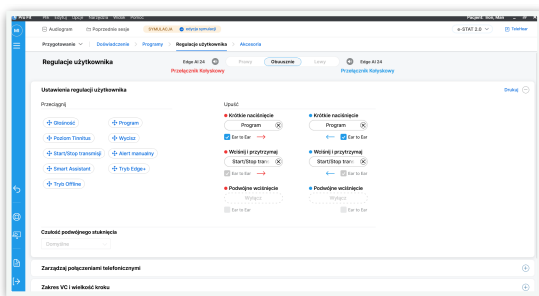

Pacjent:

Po uruchomieniu mikrofonu, pacjent aktywuje przesyłanie dźwięku do aparatów słuchowych poprzez:

- Przycisk aparatu słuchowego: Wciśnij i przytrzymaj
- Podwójne stuknięcie w aparat słuchowy
- Przycisk "Ulubione" w pilocie StarLink 2.0 (po wcześniejszym zaprogramowaniu)
- Aplikacja My Starkey/My Audibel zakładka: Akcesoria/Opcje transmisji strumieniowej

