

Bezprzewodowy Programer 2,4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wprowadzenie

Instrukcja ta zawiera informacje, w jaki sposób podłączyć Programator do laptopa lub komputera stacjonarnego za pośrednictwem kabla USB.

Opis

Programator działa jako interfejs pomiędzy bezprzewodowymi aparatami słuchowymi, a komputerowym programem do dopasowania.

Programator składa się z dwóch komponentów: stacja dokująca i "klucz dostępowy" (zabezpieczenie sprzętowe używane w zamkniętym oprogramowaniu; małe urządzenie podłączane do portu USB)



Instalacja

1. Sprawdź, czy na komputerze zainstalowany jest program Inspire 2014.2 lub nowszy. Programator nie będzie obsługiwał wcześniejszych wersji programu.

2. Włóż końcówkę kabla USB stacji dokującej do dostępnego portu USB w komputerze.

Uwaga: Zaleca się użycie Programatora w komplecie (klucz sprzętowy + stacja dokująca).

3. Programator został zaprojektowany jako urządzenie "plug and play" nie wymaga płyty CD ani restartu komputera. Sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie.

Uruchomienie

Aby użyć programatora:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do twojego komputera
2. Uruchom program Inspire 2014.2 lub nowszy
3. Wyszukaj Programator, jeśli jest to konieczne, wykonaj następujące czynności:
 - Wybierz Narzędzia
 - Wybierz Programator
 - Kliknij Wyszukaj
 - Wybierz Programator, aby zaprogramować aparaty słuchowe

Informacje dotyczące przepisów i konserwacji

Klasyfikacja

- Klasyfikacja zgodna z EN 60950-1: Klasa II Praca ciągła
- Wszystkie komputery na których korzysta się z Programatora 2,4 GHz muszą być zgodne z normą EN 60950 (ISO 950)

Zasilanie

- Napięcie zasilania: 5,0 vDC zasilane z portu USB komputera zgodnego z normą EN 60950 (ISO 950)

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

Przechowywanie i warunki wysyłki

- Temperatura: od -40 do 85C, od -40 do 185 F
- Wilgotność: od 30 do 90%, bez kondensacji

Warunki eksploatacji

- Temperatura: od -40 do 85C, od -40 do 185 F
- Wilgotność: od 30 do 90%, bez kondensacji

Należy unikać stosowania Programatora 2,4 GHz w miejscach narażonych na następujące warunki:

- Skrajne temperatury
- Wyładowanie elektrostatyczne
- Duże ilości pyłu

Programator należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki zwilżonej wodą z mydłem.

Ostrzeżenie

- Nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu, kosmetyków do czyszczenia zewnętrznej części Programatora.
- Nie rozlewaj płynów na Programator.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na wierzchu urządzenia.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do portów urządzenia.
- Nie otwieraj, nie demontuj ani nie modyfikuj Programatora samodzielnie.

Przepisy prawne

Bezprzewodowość 2,4GHz Opis techniczny

Bezprzewodowy Programator 2,4 GHz działa w paśmie 2,4-2,4835 GHz z maksymalną mocą radiową 1 dBm z modulacją transmisji 1M33G1D przy użyciu protokołu Bluetooth Low Energy. Odbiornik sekcji radiowej ma szerokość pasma 2 MHz.

Informacje FCC/IC

FCC ID: QOQBLED112

IC: 5123A-BGBLED112

KCC: CRM-BGT-BLED112



R

003 WW A111471

Wytyczne FCC

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega dwóm następującym warunkom.

(1) Niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz (2) niniejsze urządzenie musi dopuszczać wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Producent nie odpowiada za żadne zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego spowodowane nieautoryzowanymi zmianami wprowadzonymi do tego urządzenia. Zmiany takie mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z niniejszego urządzenia.

Producent oświadcza, że niniejszy Programer 2,4GHz jest zgodny z wymaganiami jakościowymi oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Kopię Deklaracji Zgodności można uzyskać pod adresami:

Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave.South

Eden Preire, MN 55344 USA



Starkey Laboratories Poland Sp.zo.o.

Wirażowa 119

2-145 Warszawa



Utylizacja sprzętu elektronicznego musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w Polsce



Consult Operations Manual

