

QUICKTIP

Pilot StarLink 2.0

Pilot zdalnego sterowania StarLink 2.0 został przeprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie, umożliwiając użytkownikom łatwe sterowanie głośnością, zmianę programów i szybki dostęp do ulubionych funkcji. Teraz z wymienną baterią i poręczną smyczą.




Parowanie


Pilot zdalnego sterowania StarLink 2.0 musi być sparowany, aby współpracować z kompatybilnymi aparatami słuchowymi 2,4 GHz na platformach Neuro i Thrive. Parowanie odbywa się raz, a następnie aparaty słuchowe i pilot automatycznie się rozpoznają.

Parowanie w Inspire X (rozwiązania Evolv AI, Arc AI)

1. Uruchom Inspire X, podłącz i wykryj aparaty słuchowe.
2. Wybierz Akcesoria na lewym pasku nawigacyjnym.
3. Upewnij się, że przełącznik blokady znajduje się w położeniu odblokowania (w górę). Umieść aparaty słuchowe w odległości do 15 centymetrów od pilota.
4. Przełącz pilota w tryb parowania przyciskając Ulubione przez 5 sekund.
5. Dioda LED zacznie szybko migać.
6. Wybierz opcję Paruj w Inspire, aby przełączyć aparaty słuchowe w tryb parowania.

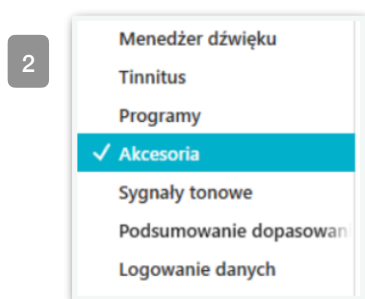


7. Parowanie zakończy się pomyślnie, gdy obraz pilota zostanie wyświetlony na ekranie akcesoriów.
8. Użyj menu rozwijanego pod obrazem pilota, aby ustawić konfigurację przycisku Ulubione.
9. W razie potrzeby wybierz ikonę informacji, aby uzyskać instrukcje parowania.

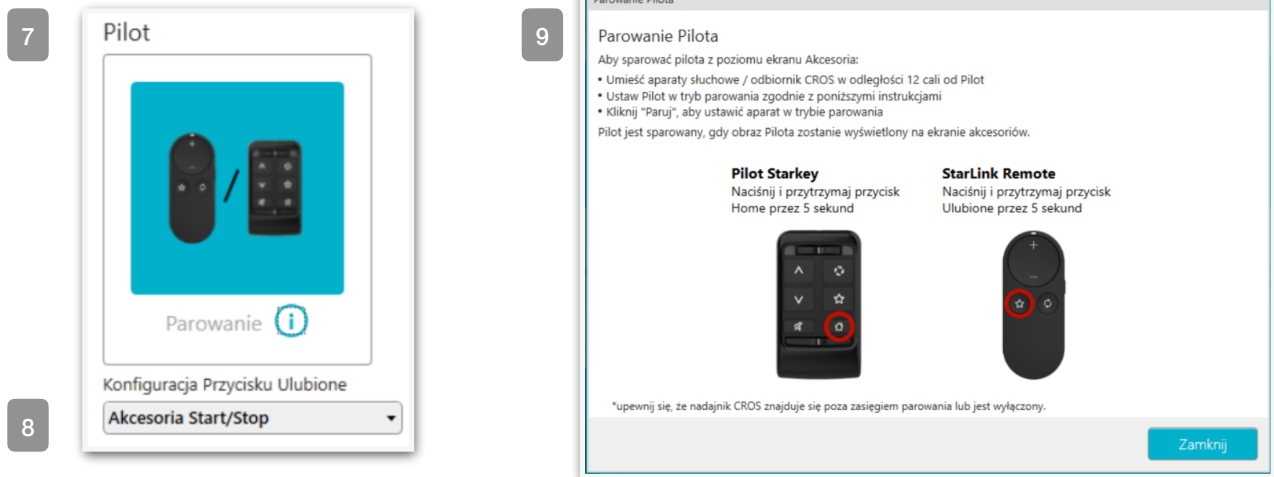


Parowanie w Pro Fit (rozwiązania Genesis AI, Intrigue AI)


1. Uruchom Pro Fit i podłącz aparaty słuchowe.
2. Wybierz Akcesoria z sekcji Przygotowanie (A) w Pro Fit lub z rozwijanego menu po lewej stronie (B).
3. Upewnij się, że przełącznik blokady w pilocie znajduje się w położeniu odblokowania (w górę).
4. Umieść aparaty słuchowe w odległości do 15 centymetrów od pilota.
5. Przełącz pilota w tryb parowania, naciskając przycisk Ulubione przez 5 sekund.

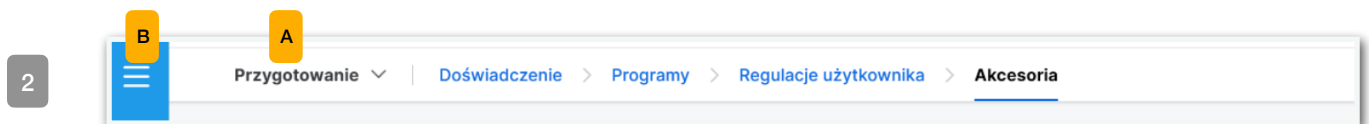

6. Dioda LED zacznie szybko migać.
7. Wybierz opcję parowania „+” w Pro Fit, aby przełączyć aparaty słuchowe w tryb parowania.
8. Parowanie zakończy się pomyślnie, gdy na ekranie akcesoriów zostanie wyświetlony obraz pilota.

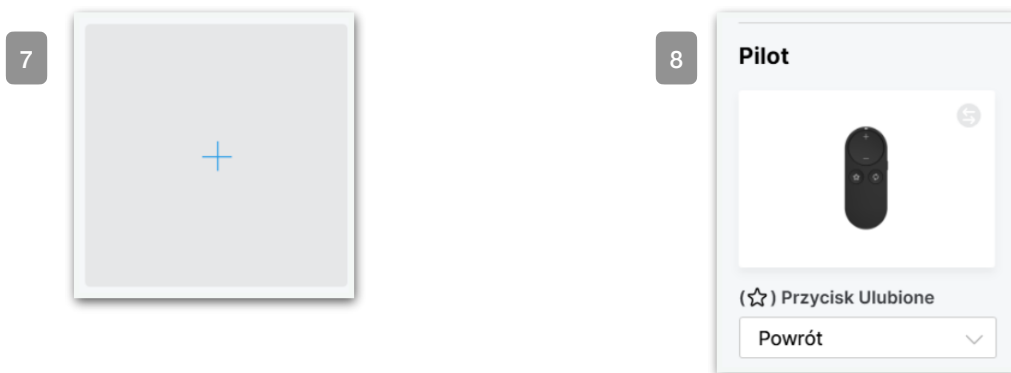

9. Użyj menu rozwijanego pod obrazem pilota, aby ustawić konfigurację przycisku Ulubione.
10. W razie potrzeby wybierz [informacje o parowaniu](#), aby uzyskać instrukcje parowania.

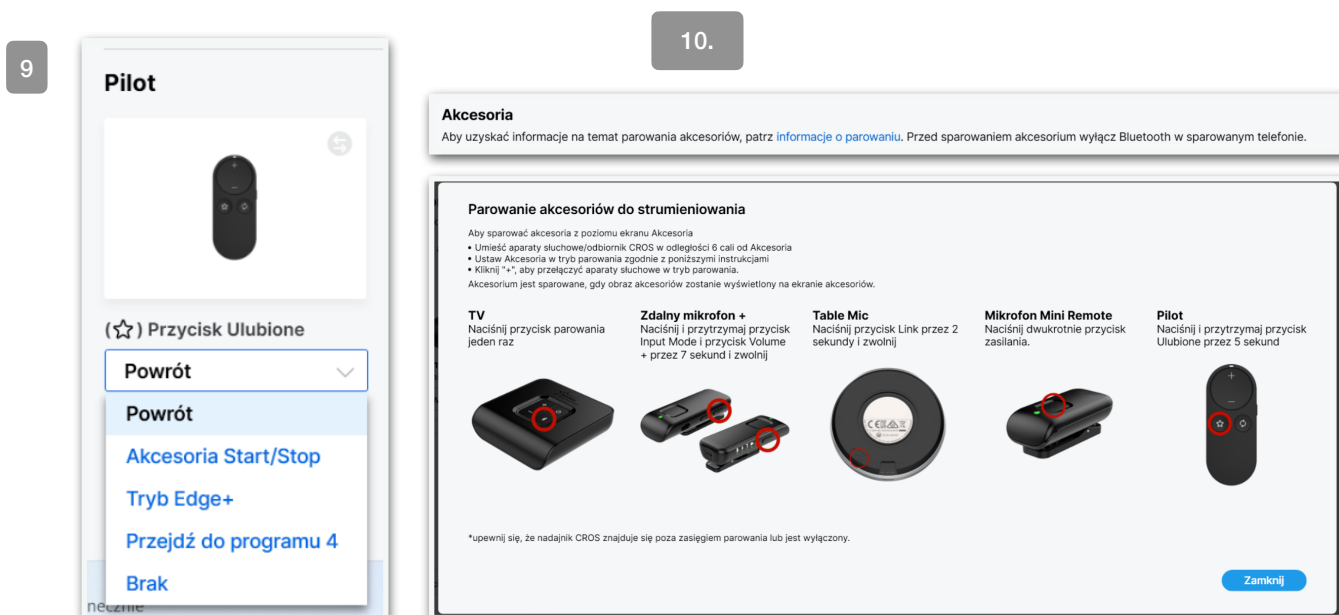

Parowanie poza programem do dopasowania aparatów słuchowych (Inspire, Pro Fit)

1. Wyłącz telefon komórkowy lub inne akcesoria, które były wcześniej sparowane z aparatami słuchowymi.
2. Upewnij się, że przełącznik blokady znajduje się w położeniu odblokowania (w górę).
3. Wyłącz, a następnie włącz aparaty słuchowe, aby przełączyć je w tryb parowania.
4. Umieść aparaty słuchowe w odległości do 15 centymetrów od pilota.
5. Naciśnij przycisk Ulubione na 5 sekund. Dioda LED zacznie szybko migać.

6. Gdy dioda LED zaświeci się na 2 sekundy, oznacza to że, oba urządzenia są sparowane. Pilot zdalnego sterowania rozpozna, czy dopasowanie jest jedno czy obustronne i odpowiednio sparuje jedno lub dwa urządzenia.

UWAGA: Akcesoria można parować tylko z aparatami słuchowymi (nie z iPhone'em/aplikacją).



Użycie



Głośność: Krótkie naciśnięcie strzałek zwiększa/zmniejsza głośność. W trakcie strumieniowania dźwięku pilot reguluje głośność streamingu z akcesoriów lub telefonu.



Program: Przechodzi przez wszystkie programy ustawione w trakcie dopasowania aparatów słuchowych.



Zablokuj/Odblokuj: Odblokuj, aby dokonać regulacji, Zablokuj, aby zapobiec niezamierzonym zmianom i zachować żywotność baterii.



Przycisk Ulubione: Aktywuje funkcję przypisaną do przycisku Ulubione. Przycisk Ulubione jest konfigurowany w oprogramowaniu Inspire/Pro Fit, a dostępne opcje mogą obejmować:

- **Brak:** Brak wpływu na aparaty słuchowe.
- **Powrót:** Przenosi aparaty słuchowe do programu Osobiste/Normalne.
- **Akcesoria Start/Stop:** Uruchamianie lub zatrzymywanie strumieniowego przesyłania dźwięku z urządzenia do transmisji strumieniowej 2,4 GHz.
- **Tryb Edge+:** Naciśnij, aby włączyć tę funkcję zaprojektowaną w celu natychmiastowego uzyskania najlepszego dźwięku dla bieżącego otoczenia. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję- tylko aparaty słuchowe z procesorem Neuro (Genesis IA, Intrigue AI)
- **Comfort Boost:** Naciśnij, aby zoptymalizować jakość dźwięku w hałaśliwym otoczeniu. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję-tylko aparaty słuchowe platformy Thrive (Evolv AI, Arc AI)
- **Przejdź do programu 4:** Przenosi aparaty słuchowe do programu 4.
- **Włączanie/wyłączanie stymulacji szumów usznych:** Włączanie lub wyłączanie stymulacji szumów usznych w aparatach słuchowych gdy aktywowana jest opcja Tinnitus.