

Instrukcja obsługi zdalnego mikrofonu StarLink Edge



StarLink og Starkey er varemerker for Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Med enerett.
P00009896 2/25 BKL3245-00-DA-NL-NO-PL-SV-XX
Patent: www.starkey.com/patents



Akcesorium do:

Aparatów słuchowych z technologią Bluetooth LE Audio.

Gratulujemy zakupu nowego zdalnego mikrofonu StarLink Edge!

Zdalny mikrofon wzmacnia mowę, dzięki czemu możesz cieszyć się rozmowami i mieć łączność z otaczającym Cię światem.

Skorzystaj z niniejszej instrukcji, aby rozpocząć.

Spis treści

1. Poznaj zdalny mikrofon

Poznaj zdalny mikrofon.....	83
W jaki sposób działa zdalny mikrofon.....	84
Konfigurowanie zdalnego mikrofonu.....	84
Korzystanie ze zdalnego mikrofonu.....	86
Noszenie zdalnego mikrofonu.....	89
Ładowanie zdalnego mikrofonu.....	89

2. Instrukcja rozwiązywania problemów.....91


3. Dodatkowe wskazówki

Przeznaczenie.....	93
Informacje FCC.....	95
Informacje regulacyjne.....	96

Poznaj zdalny mikrofon

Informacje ogólne

- Przełącznik zasilania**
Włącza/wyłącza zdalny mikrofon.
- Lampka kontrolna**
Wskazuje aktualny tryb działania zdalnego mikrofonu.
- Mikrofony**
Odbierają głos rozmówcy, dzięki czemu jest on dobrze słyszalny.
- Port zasilania (USB-C)**
Do podłączenia zasilacza.
- Klips**
Służy do mocowania zdalnego mikrofonu do ubrania osoby mówiącej.
- Przycisk parowania**
Łączy zdalny mikrofon z aparatami słuchowymi.
- Przycisk zmiany głośności/programu**
Reguluje głośność lub zmienia program aparatu słuchowego.

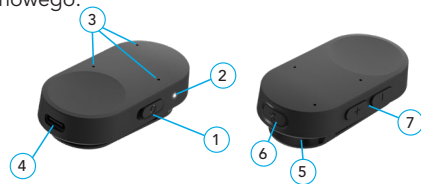

Jak działa zdalny mikrofon

Zdalny mikrofon został zaprojektowany tak, aby wzmocnić mowę i pomóc użytkownikowi swobodnie rozmawiać z innymi osobami.



Można również spróbować umieścić zdalny mikrofon w pobliżu telewizora, aby lepiej słyszeć dźwięk. *Aby uzyskać najlepszy efekt, użyj streamera TV. Szczegółowe informacje można uzyskać u specjalisty z zakresu protetyki słuchu.*

Łączenie zdalnego mikrofonu z aparatami słuchowymi:

Przed pierwszym użyciem zdalnego mikrofonu należy go sparować z aparatem słuchowym (aparatami słuchowymi). Dzięki temu akcesorium rozpoznaje aparaty słuchowe i może z nimi współpracować.

Konfigurowanie zdalnego mikrofonu

Włączanie/wyłączanie zasilania

Użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć zdalny mikrofon:

- **Włączanie zasilania:** Przesuń przełącznik w kierunku diody LED. Dioda LED będzie świecić na biało przez 2 sekundy.
- **Wyłączanie zasilania:** Przesuń przełącznik w kierunku przeciwnym do diody LED. Dioda LED zaświeci się na czerwono na 2 sekundy. Pomarańczowy kolor będzie widoczny obok przełącznika.



Łączenie zdalnego mikrofonu z aparatami słuchowymi

Przed pierwszym użyciem zdalnego mikrofonu należy go sparować z aparatem słuchowym (aparatami słuchowymi). Dzięki temu akcesorium rozpoznaje aparaty słuchowe i może z nimi współpracować.

KROK 1: Włącz zdalny mikrofon.


KROK 2: Wyłącz i włącz aparaty słuchowe.

- Jeśli aparat słuchowy można ładować, umieść go w ładowarce na 3 sekundy i wyjmij. Jeśli aparat słuchowy jest zasilany baterią, należy otworzyć i zamknąć komorę baterii.
- **W przypadku systemów CROS:** Wyłącz aparat słuchowy i nadajnik CROS. Następnie **włącz** aparat słuchowy, ale pozostaw nadajnik CROS **wyłączony**.

KROK 3: Połącz zdalny mikrofon z aparatem słuchowym (aparatami słuchowymi):

1. Upewnij się, że aparaty słuchowe nie są podłączone do pobliskich urządzeń Bluetooth®:
 - Wyłącz Bluetooth w telefonie komórkowym.
 - Wyłącz wszystkie akcesoria bezprzewodowe podłączone do aparatów słuchowych.
2. Umieść aparaty słuchowe w odległości 15 cm (6 cali) od zdalnego mikrofonu. Im bliżej, tym lepiej.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 2 sekundy, dioda LED zacznie migać na zielono. W ciągu minuty dioda LED zaświeci się na zielono na 2 sekundy po zakończeniu parowania w przypadku każdego aparatu słuchowego*.

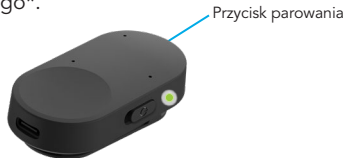

Gotowe! Przejdź do następnej strony, aby rozpocząć korzystanie ze zdalnego mikrofonu.

Korzystanie ze zdalnego mikrofonu

KROK 1: Upewnij się, że aparaty słuchowe są włączone.

KROK 2:

- **Włącz zdalny mikrofon:**
Przesyłanie dźwięku rozpoczyna się automatycznie w aparacie słuchowym.
- **Przesyłanie dźwięku zostanie wstrzymane dla transmisji o wyższym priorytecie**, tj. połączeń telefonicznych, multimediów z telefonu.

KROK 3: Wyłącz zdalny mikrofon: Przesyłanie dźwięku zostaje wstrzymane, gdy zdalny mikrofon zostanie wyłączony.

*Jeśli stałe zielone światło nie zaświeci się przez 2 sekundy, powtórz kroki 1-3.

KROK 4: Dostosowanie głośności dźwięku przesyłanego bezprzewodowo.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij przyciski regulacji głośności do góry lub do dołu z boku zdalnego mikrofonu.
- Naciśnij (lub stuknij delikatnie w aparat będący na uchu) **przycisk aparatu słuchowego**.*
- Dostosuj ustawienia na ekranie akcesoriów w zgodnej aplikacji mobilnej.

KROK 5: Zmiana programu w aparacie słuchowym.

Długie naciśnięcie (2 sekundy) przycisków regulacji głośności spowoduje przełączenie między programami, które zostały zaprogramowane przez protetyka słuchu w Twoich aparatach słuchowych.

KROK 6: Używanie zdalnego mikrofonu jako pilota zdalnego sterowania.

Gdy zdalny mikrofon jest włączony lub wyłączony/nie przesyła dźwięku bezprzewodowo, możliwe jest:

- Zmiana głośności aparatu słuchowego za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisków +/-.
- Zmiana programu aparatu słuchowego za pomocą dłuższego naciśnięcia przycisków +/-.

UWAGA: Aparat słuchowy wyemituje dźwięk informujący o niskim poziomie naładowania baterii zdalnego mikrofonu.

*Funkcja ta musi zostać skonfigurowana przez protetyka słuchu.

Dioda sygnalizacyjna

Dioda sygnalizacyjna wskazuje aktualny tryb działania zdalnego mikrofonu:

Status diody sygnalizacyjnej	Tryb pracy
Ciągłe czerwone światło przez 2 sekundy	Odłączono od przewodu ładowania
Ciągłe białe światło przez 2 sekundy	Włączono
Wolno migające białe światło	Włączone, brak przesyłania dźwięku
Migające zielone światło do ciągłego zielonego	Parowanie z urządzeniem
Migające zielone światło do ciągłego zielonego	Parowanie nie powiodło się
Ciągłe czerwone światło przez 2 sekundy	Brak połączenia z aparatem słuchowym przez 30 minut. Mikrofon przejdzie w tryb uśpienia (zostanie wybudzony za pomocą dowolnego przycisku).
Biała dioda LED	Po naciśnięciu przycisku
Podwójny biały sygnał pulsacyjny	Podczas przesyłania dźwięku
Czerwony sygnał pulsacyjny	Niski poziom naładowania baterii
Sygnał dźwiękowy	Niski poziom naładowania baterii aparatu słuchowego (3 sygnały)
Ciągłe czerwone światło przez 2 sekundy	Wyłączenie (poprzez przełącznik lub z powodu niskiego poziomu naładowania baterii)


UWAGA: Typowy zakres działania sieci bezprzewodowej wynosi do 15 metrów (50 stóp). Zasięg może zostać skrócony przez czynniki środowiskowe (np. przeszkody, zakłócenia, pozycję osób). Możliwe jest uzyskanie większego zakresu działania, jednak jakość dźwięku lub połączenia może ulec pogorszeniu.

Noszenie zdalnego mikrofonu

Zdalny mikrofon może być przymocowany do ubrania osoby mówiącej. Najlepiej umieścić go w odległości 20 cm (8 cali) od ust.

Instrukcje dotyczące mocowania na odzieży:

1. Naciśnij klips zdalnego mikrofonu, aż się otworzy.
2. Umieść otwarty klips na ubraniu.
3. Puść klips.
4. Upewnij się, że zdalny mikrofon jest pewnie przymocowany do ubrania.

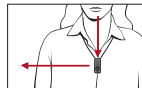

Ładowanie zdalnego mikrofonu

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda sygnalizacyjna zdalnego mikrofonu będzie migać na czerwono, a podczas przesyłania dźwięku będzie słyszalny sygnał informujący o niskim poziomie naładowania baterii. Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana, po włączeniu zasilania zdalnego mikrofonu dioda sygnalizacyjna nie zaświeci się.

1. Podłącz końcówkę USB-C kabla ładującego do portu USB-C w mikrofonie zdalnym.



2. Podłączyć końcówkę USB kabla do zasilacza(adaptera).
3. Podłączyć zasilacz do zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak gniazdko ściennie.
4. Sprawdź stan ładowania za pomocą diody sygnalizacyjnej na zdalnym mikrofonie.
 - Podczas ładowania dioda LED świeci się na biało
 - Dioda LED nie świeci po pełnym naładowaniu
 - Pełne naładowanie mikrofonu zdalnego trwa około 3 godzin
 - Zdalny mikrofon będzie działał przez około 10 godzin od momentu naładowania, w zależności od ustawień głośności i intensywności hałasu.

Przypomnienie – ładowanie zdalnego mikrofonu może trwać dłużej, jeśli w trakcie ładowania odbywa się transmisja dźwięku. Ładowanie trwa zwykle krócej, gdy zdalny mikrofon jest WYŁĄCZONY.

Instrukcja rozwiązywania problemów

W razie problemów ze zdalnym mikrofonem: Skorzystaj z tych wskazówek. Jeśli problemy nie ustąpią, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
W jednym lub obu aparatach słuchowych nastąpiło nieoczekiwane zatrzymanie przesyłania dźwięku.	Aparaty słuchowe mogą znajdować się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej.	Należy zbliżyć się do zdalnego mikrofonu.
	Poziom naładowania baterii aparatu słuchowego nie pozwala na przesyłanie dźwięku.	Wymienić baterię aparatu słuchowego na nową. LUB Naładować aparat słuchowy.
W jednym lub obu aparatach słuchowych nastąpiło nieoczekiwane zatrzymanie przesyłania dźwięku.	Przerwane połączenie bezprzewodowe z mikrofonem.	Uruchomić ponownie przesyłanie dźwięku. Wyłączyć i ponownie włączyć zdalny mikrofon.
Zniekształcona jakość dźwięku przesyłanego.	Niski poziom naładowania baterii w mikrofonie zdalnym.	Naładować zdalny mikrofon. Patrz Ładowanie zdalnego mikrofonu na str. 89.

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Występują trudności z usłyszeniem osoby mówiącej w hałaśliwym otoczeniu.	Zdalny mikrofon może znajdować się zbyt daleko od osoby mówiącej.	Zbliżyć zdalny mikrofon do ust osoby mówiącej.
	Zdalny mikrofon może być zakryty odzieżą lub nie jest prawidłowo ustawiony.	1. W razie potrzeby odsłonić mikrofon zdalny. 2. Umieścić mikrofon zdalny w pobliżu ust osoby mówiącej.
Dioda sygnalizacyjna dwukrotnie miga na białą, ale dźwięk nie jest przesyłany do aparatów słuchowych.	Aparaty słuchowe nie są gotowe do odbioru dźwięku przesyłanego strumieniowo.	Włączyć i wyłączyć zasilanie aparatów słuchowych.

Przeznaczenie

Zdalny mikrofon jest akcesorium do aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne działającego na częstotliwości 2,4 GHz. Mikrofon działa jak bezprzewodowy nadajnik dźwięku ze źródła audio do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne. Noszony przez osobę mówiącą na odległość w hałaśliwym otoczeniu działa jako urządzenie wspomagające słyszenie.

Zdalny mikrofon jest zgodny z najbardziej rygorystycznymi międzynarodowymi normami kompatybilności elektromagnetycznej. Jednak istnieje możliwość, że możesz doświadczyć zakłóceń spowodowanych przez zakłócenia linii energetycznych, wykrywacze metali na lotnisku, pola elektromagnetyczne z innych urządzeń medycznych, sygnały radiowe oraz wyładowania elektrostatyczne.

Zdalny mikrofon należy czyścić ściereczką zwilżoną wodą z mydłem.

W przypadku stosowania innych wyrobów medycznych lub noszenia implantów, takich jak defibrylatory lub rozruszniki serca, i w przypadku obaw, że zdalny mikrofon może powodować zakłócenia w działaniu wyrobu medycznego, należy skontaktować się z lekarzem lub producentem wyrobu medycznego w celu uzyskania informacji na temat ryzyka zakłóceń. Zdalnego mikrofonu nie należy używać podczas badania MRI ani w komorze hiperbarycznej. Aparaty słuchowe nie są formalnie certyfikowane do pracy w atmosferach wybuchowych, jakie mogą występować w kopalniach węgla lub niektórych fabrykach chemicznych.


Zastosowanie w samolotach

Mikrofonu zdalnego nie należy używać w samolotach, chyba że personel samolotu wyraźnie zezwoli na takie użycie.

Używanie w innych krajach

Bezprzewodowe aparaty słuchowe są zatwierdzone do działania na częstotliwości radiowej specyficznej dla danego kraju lub regionu i mogą nie być zatwierdzone do użytku poza danym krajem lub regionem.

Należy pamiętać, że działanie urządzenia podczas podróży międzynarodowych może powodować zakłócenia w działaniu innych urządzeń elektronicznych lub inne urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w działaniu zdalnego mikrofonu.

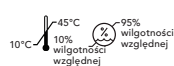

Zdalny mikrofon jest przeznaczony do pracy, przechowywania i transportu w temperaturze od -10°C (14°F) do 45°C (113°F) i zakresie wilgotności względnej 10–95% oraz wysokości od 70 kPa do 106 kPa (co odpowiada wysokości od 380 m (1200 stóp) poniżej poziomu morza do 3000 m (10 000 stóp)).

Zakres temperatury ładowania wynosi od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).

Korzyści kliniczne:

Samo akcesorium nie zapewnia bezpośrednich korzyści klinicznych. Pośrednią korzyścią kliniczną jest umożliwienie, aby wyrób macierzysty (bezprzewodowe aparaty słuchowe) osiągnął zamierzone zastosowanie.

Zgodnie z przepisami jesteśmy zobowiązani do zapewnienia następujących ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE: Należy unikać używania zdalnego mikrofonu bezpośrednio obok innego sprzętu elektronicznego, ponieważ może to spowodować jego nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy zwrócić uwagę, czy aparaty słuchowe i inne urządzenia działają prawidłowo.

OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, komponentów lub części zamiennych innych niż dostarczone przez producenta zdalnego mikrofonu może skutkować zwiększoną emisją elektromagnetyczną i zmniejszoną odpornością elektromagnetyczną oraz pogorszeniem wydajności.

OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie mobilne działające na częstotliwości radiowej jest używane w odległości mniejszej niż 30 cm (12 cali) od zdalnego mikrofonu, może to spowodować pogorszenie jego działania. W takim przypadku należy odsunąć się od sprzętu komunikacyjnego.

Chociaż zdalny mikrofon nie posiada formalnego certyfikatu (klasa IP) w celu ochrony przed wnikaniem pyłu lub wody, zgodnie z IEC 60529, został przetestowany do poziomu IP 5X. Oznacza to, że zdalny mikrofon jest chroniony przed kurzem.

Bateria w zdalnym mikrofonie nie jest wymienna. Nie wolno podejmować prób wymiany baterii. Zdalny mikrofon nie zawiera żadnych części przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Nie należy go otwierać ani modyfikować.

Zasilacz sieciowy USB używany ze zdalnym mikrofonem musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez uznane krajowe laboratorium badawcze (w Ameryce Północnej) lub spełniać obowiązujące krajowe normy bezpieczeństwa elektrycznego (w innych krajach).

Nie podłączaj zdalnego mikrofonu do żadnych urządzeń, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji.

Przewidywany okres eksploatacji zdalnego mikrofonu wynosi 3 lata.

Opis techniczny łączności bezprzewodowej

Zdalny mikrofon działa w paśmie 2,4–2,4835 GHz z maksymalną skuteczną mocą promieniowania 8 dBm, z modulacją transmisji GFSK, z szerokością pasma 2 MHz. Sekcja odbiornika radia pracuje w paśmie o szerokości 2 MHz.

Zdalny mikrofon został przetestowany i przeszedł pomyślnie następujące testy emisji i odporności:

- IEC 60601-1-2 Wymagania dotyczące emisji promieniowanych i przewodzonych dla urządzenia klasy B grupy 1 zgodnie z CISPR 11.
- Zniekształcenia harmoniczne i wahania napięcia wpływające na źródło zasilania, jak podano w Tabeli 2 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na promieniowanie RF przy poziomie pola 10 V/m pomiędzy 80 MHz a 2,7 GHz, a także wyższe poziomy pola z urządzeń komunikacyjnych określone w Tabeli 9 normy IEC 60601-1-2.

- Odporność na pola magnetyczne o częstotliwości sieci zasilającej na poziomie pola 30 A/m oraz pola magnetyczne znajdujące się w pobliżu jak podano w Tabeli 11 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na wyładowania ESD na poziomie +/- 8 kV i +/- 15 kV.
- Odporność na szybkie elektryczne stany przejściowe na wejściu zasilania na poziomie +/- 2 kV przy częstotliwości powtarzania 100 Hz.
- Odporność na przepięcia na wejściu zasilania +/- 1 kV międzyprzewodowego.
- Odporność na przewodzone zakłócenia wywołane przez pola RF na wejściu zasilania, jak podano w Tabeli 6 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na spadki i przerwy napięcia na wejściu zasilania zgodnie z tabelą 6 normy IEC 60601-1-2.

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH W UE

Wszelkie poważne incydenty związane z urządzeniem należy zgłaszać lokalnemu przedstawicielowi firmy Starkey oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik mieszka. Poważny incydent jest definiowany jako jakiegolwiek usterka, pogorszenie właściwości i/lub wydajności urządzenia albo nieprawidłowość w instrukcji obsługi/ na etykiecie urządzenia, która może prowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia użytkownika LUB może to nastąpić w przypadku ponownego wystąpienia tego incydentu.

Informacje FCC

UWAGI DOTYCZĄCE ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

Identyfikator FCC: EOA-24RME

IC: 6903A-24RME (model 960)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 ustawy FCC oraz ze standardami RSS zwolnionymi z licencji ISSED Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego urządzenia. Takie modyfikacje mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Starkey Laboratories, Inc. niniejszym oświadcza, że zdalny mikrofon jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Kopię deklaracji zgodności można uzyskać pod następującym adresem docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Niniejszym firma Starkey Laboratories, Inc. oświadcza, że mikrofon zdalny jest zgodny z brytyjskimi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych SI 2017 z późniejszymi zmianami. Kopię deklaracji zgodności można uzyskać pod następującym adresem docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Informacje regulacyjne

W celu serwisu lub naprawy należy najpierw skontaktować się z gabinetem protetyki słuchu w którym zakupiono aparaty. W razie potrzeby aparat słuchowy można wysłać na adres:



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 Stany Zjednoczone
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Niemcy

Autoryzowany podmiot w Wielkiej Brytanii:
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, UK
www.starkey.co.uk
Importer na terytorium Polski:
Starkey Laboratories Poland Sp. z o.o.,
ul. Postępu 15,
02-676 Warszawa



Ze zużytym sprzętem elektronicznym należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi



Przechowywać w suchym miejscu

Instrukcje dotyczące utylizacji starych urządzeń elektronicznych

Starkey Laboratories, Inc. zachęca, UE wymaga oraz lokalne przepisy mogą wymagać usunięcia zdalnego mikrofonu za pośrednictwem lokalnego procesu recyklingu/utylizacji elektroniki.

Poniższe instrukcje są przeznaczone dla personelu zajmującego się utylizacją/recyklingiem. Dołącz tę instrukcję podczas utylizacji zdalnego mikrofonu.

TYLKO DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UTYLIZACJĄ/RECYKLINGIEM

Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową.

Aby wyjąć baterię:

- Wyłączyć zdalny mikrofon.
- Rozdzielić połówki obudowy za pomocą małego śrubokręta.
- Odciąć przewody baterii od płytki drukowanej, aby zapobiec przypadkowemu zwarciu.
- Podważać baterię z dala od obudowy, używając szerokiego płaskiego ostrza.

Takie modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Symbol	Znaczenie symbolu	Odpowiedni standard	Numer symbolu
	Producent	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Data produkcji	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Numer katalogowy	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Numer seryjny	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Wyrób medyczny	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Przechowywać w suchym miejscu	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Limit temperatury	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Ograniczenie wilgotności	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Przestroga:	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Ogólny znak ostrzegawczy	EC 60601-1, nr referencyjny Tabela D.2, znak bezpieczeństwa 2	ISO 7010-W001
	Patrz instrukcja obsługi/broszura	EC 60601-1, nr referencyjny Tabela D.2, znak bezpieczeństwa 10	ISO 7010-M002
	Segreguj oddzielnie	DYREKTYWA 201 2/19/EU (WEEE)	Załącznik IX
	Sprzęt klasy II	IEC 60417, nr referencyjny Tabela D.1	Symbol 9 (IEC 60417- 5172)
	Zgodność z przepisami Oznaczenie (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	Nd.
	Znak Giteki	Japońskie prawo radiowe	N/A
	Prąd stały	IEC 60601-1, nr referencyjny Tabela D.1	IEC 60417-5031
	Symbol recyklingu	Parlament Europejski i Dyrektywa Rady 94/62/WE	Załącznik I-VII



StarLink i Starkey są znakami towarowymi firmy Starkey Laboratories, Inc.

©2024 Starkey Laboratories, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

P00009896 2/25 BKL3245-00-DA-NL-NO-PL-SV-XX

Patent: www.starkey.com/patents



P00009896